



“เซปเอฟเอส โล้มี รีมูฟเวอร์”

ZEP FS LIME REMOVER

น้ำยาทำความสะอาด ขจัดสนิมและตะกรันของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นโลหะ
สแตนเลส อะลูมิเนียม รวมทั้ง เครื่องแก้ว หลอดทดลองต่าง ๆ

คุณสมบัติ

เป็นน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นหัวเชื้อเข้มข้น ผลิตขึ้นมาเพื่องานกำจัดคราบสกปรก สนิม คราบตะกรัน คราบโปรตีนและคราบเลือด

ประโยชน์

- * สามารถทำความสะอาดหลอดแก้วทดลองต่าง ๆ แม้ที่มีคราบสกปรกติดแน่น ให้หลุดออกได้ภายในเวลา รวดเร็วมาก (ทันทีที่สัมผัสกับน้ำยา ทำให้ผลการวิเคราะห์มีความ แน่นอน ถูกต้อง
- * สามารถกำจัดหินปูนและคราบสนิมจากผิวหน้าของเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่เป็น สแตนเลส หรือ อะลูมิเนียม ทำให้มีประสิทธิภาพและดูใหม่เหมือนเดิม
- * ปลอดภัยมาก ไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้ หรือการกัดกร่อนผิววัสดุต่างๆ

เหมาะสำหรับ .- ใช้ทำความสะอาดหลอดทดลองและเครื่องแก้วในห้องแล็บ โรงพยาบาล ศูนย์วิจัย

- ใช้ขจัดตะกรันและสนิมในอุปกรณ์ที่เป็นโลหะทุกชนิด เช่น หม้อนึ่ง(AUTOCLAVE) หม้ออบเครื่องมือแพทย์
- เครื่องมือแพทย์ เคียงคนไข้ เครื่องล้างจาน หม้อต้มกาแฟ เครื่องทำน้ำแข็งเครื่องทำน้ำเย็นเครื่องอุ่นอาหาร เครื่องใช้สแตนเลส อะลูมิเนียม เซรามิก แก้ว และพลาสติก

วิธีใช้

สำหรับล้างตะกรันในหม้อนึ่ง (AUTOCLAVE) ผสมน้ำยาอัตราส่วน:10 แล้วแช่ประมาณ 1-3 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาของตะกรัน ใช้แปรงแข็งช่วยขจัดดูบ้างจากนั้นถ่ายน้ำ ออกแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

หลอดทดลอง เครื่องแก้ว ให้แช่น้ำยาที่เจือจางในอัตราส่วน 4 ออนซ์ต่อน้ำอุ่น 1 แกลลอน จนกระทั่งคราบสกปรกคราบเลือด คราบโปรตีน หลุดไป ชะล้างด้วยน้ำ ร้อนแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง

สำหรับอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ,สแตนเลส ให้สเปรย์หรือใช้แปรงท้าน้ำยาทิ้งให้ชุ่มไว้ 5-10 นาทีแล้ว จึงใช้แปรง บัดออกแล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ ในกรณีที่คราบตะกรันไม่หนามากนักอาจจะเจือจางน้ำยาได้ในอัตราส่วน ต่อ 32 (น้ำยา 4 ออนซ์ต่อน้ำ 11 แกลลอน)

สำหรับเครื่องล้างจาน ให้เติมน้ำยา แกลลอนเข้าไปในเครื่องที่มีน้ำแล้วเดินเครื่อง 5 นาที จึงปล่อยน้ำทิ้งไป

หม้อต้มกาแฟ ใช้น้ำยา1 ออนซ์ต่อน้ำ 11 แกลลอน ต้มแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

อุปกรณ์อะลูมิเนียม ให้แช่น้ำยาซึ่งผสมกับน้ำร้อนในอัตราส่วน 4 ออนซ์ต่อน้ำร้อน 1 แกลลอนจนกว่าจะเงางาม แล้วจึงนำขึ้นมาล้างด้วยน้ำร้อนแล้วปล่อยให้แห้ง ถ้าเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่แช่ไม่ได้ให้ใช้น้ำยา 1 ส่วนผสมน้ำอุ่น 5 ส่วน แล้วใช้ผ้าหรือฟองน้ำเช็ดถู ล้างอีกครั้งด้วยน้ำร้อน การล้างอะลูมิเนียมต้องจำกัดเวลา ล้างไม่เกิน 5-10 นาทีเพื่อป้องกันการเสียหาย

คุณลักษณะเฉพาะ

ลักษณะทางกายภาพ.....ใส ไม่มีสี	อายุการใช้งาน.....อย่างต่ำ 1 ปี
กลิ่น.....กรดอ่อน ๆ	ความหนาแน่น.....10.31 ปอนด์ / แกลลอน
pH (เข้มข้น)..... 0.5 – 1.0	ความถ่วงจำเพาะ.....1.235
pH (เจือจาง 1 : 5)1.5 – 2.0	

การบรรจุ แกลลอน (3.785 ลิตร)

ผู้ผลิต ZEP MANUFACTURING COMPANY ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย CLEAN PROJECT COMPANY ประเทศไทย